




PEGASI


Dream Glasses

Руководство пользователя

Вид спереди

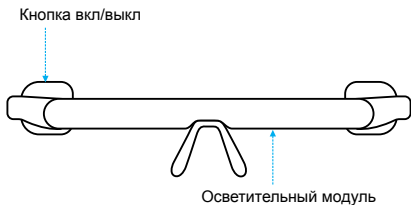


Вид сбоку

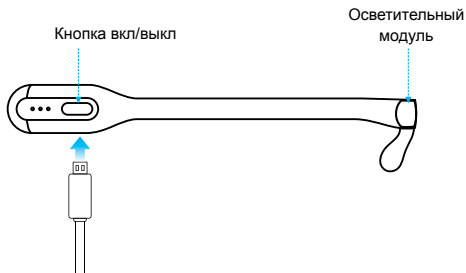


Перед первым использованием, полностью зарядите аккумулятор очков PEGASI с помощью USB-кабеля.


- Наденьте очки PEGASI и включите их, нажав кнопку включения, расположенную справа на оправе.
- Для выключения очков повторно нажмите кнопку включения.

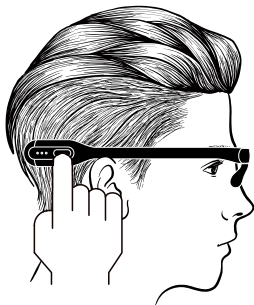


Порядок использования

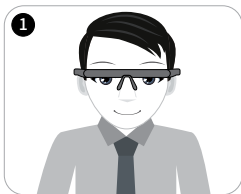

Наденьте очки

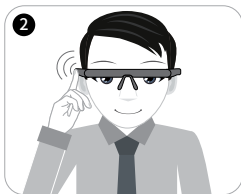

Для включения очков нажмите
кнопку включения

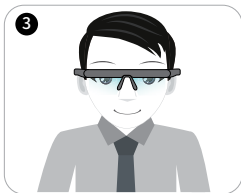

Носите очки в течение 30
минут во время работы или
других дел. После
окончания сеанса очки
отключатся автоматически


- При использовании очков PEGASI оба глаза должны быть открыты.
- Во время зарядки не включайте очки PEGASI.
- Предустановленная программа улучшения качества сна очков PEGASI длится заданное количество времени (30 минут). По завершении программы устройство автоматически выключится.
- Для достижения оптимального результата рекомендуется не прерывать выполнение программы.

Загрузите приложение


Для получения дополнительных рекомендаций и инструкций скачайте приложение PEGASI в Google Play или в App Store либо загрузите и установите это приложение, просканировав изображенный ниже QR-код.



Перед подключением очков PEGASI к приложению нажмите кнопку включения для начала беспроводной передачи или выполните инструкции приложения.

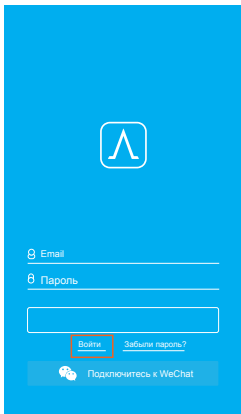

Вход

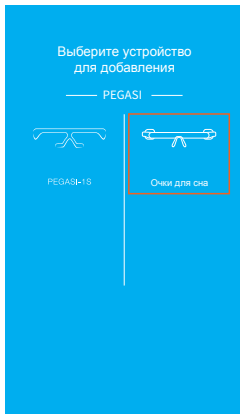

Добавить очки PEGASI

Поиск очков PEGASI



Поднесите очки PEGASI к своему телефону
Чтобы включить Bluetooth, коснитесь сенсорной
панели справа

Пропустить >

Поиск PEGASI

Подтверждение соединения



Когда очки начнут мигать, коснитесь сенсорной
панели справа для подтверждения соединения




Очки PEGASI не мигают


Подключение к PEGASI

Зарядка аккумулятора и индикация уровня заряда

- Во время зарядки три индикатора на правой дужке очков будут мигать. После полной зарядки устройства индикаторы мигать перестанут.

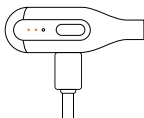


Идет зарядка

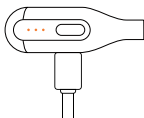

Полностью заряжены

- При низком уровне заряда аккумулятора будут мигать как осветительный модуль, так и индикатор справа. Зарядите аккумулятор.
- Весь процесс зарядки занимает около 70 минут.
- Если уровень заряда аккумулятора ниже защитного порога, то устройство переходит в режим глубокого сна и не отвечает ни на какие действия пользователя. В этом случае перед использованием устройства его необходимо полностью зарядить.
- Точный уровень заряда аккумулятора можно узнать с помощью приложения.

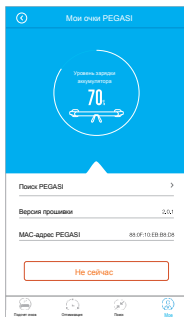

Симптом	Применение
<p>Имеются проблемы со сном (не удается заснуть в течение 30 минут, трудно просыпаться по утрам, пробуждение по ночам, недостаточная длительность фазы глубокого сна, нарушение суточного ритма и т. д.)</p>	<p>Рекомендуется надевать очки PEGASI в течение 30 минут после пробуждения по утрам, предпочтительно между 7 и 9 часами утра. Для достижения наилучшего результата в начале использования носите очки в течение не менее 7 дней подряд.</p>
<p>Сезонное аффективное расстройство (САР), недостаток сил и энергии в течение дня или депрессивное состояние</p>	<p>Надевайте очки PEGASI по мере необходимости: при сонливости, усталости, утомлении, трудности или невозможности сосредоточиться, вялости и т. п. Рекомендуемая длительность использования составляет 10 минут в день.</p>
<p>Слишком раннее пробуждение по утрам</p>	<p>Рекомендуется надевать очки PEGASI три дня подряд в течение 30 минут между 7 и 9 утра.</p>

Работа в ночные смены	Используйте 1 или 2 цикла между 7 вечера и 2 часами ночи (следующего дня).
Другое	Свяжитесь с нами по телефону: +7 (800) 511-18-73

Примечание

Очки PEGASI не мешают вашей повседневной жизни: работе в офисе, чтению, спорту, питанию, вождению автомобиля (за исключением ночного времени) и т. д.

При наличии близорукости или дальнозоркости надевайте очки PEGASI поверх обычных очков так, чтобы их оправа не перекрывала свет от осветительного модуля.

Не надевайте очки PEGASI одновременно с цветными очками, в том числе солнцезащитными очками.

Изделие является умным электронным устройством. Во избежание повреждений не допускайте попадания жидкости внутрь устройства. При неиспользовании аккумулятора в течение длительного времени убедитесь, что он хранится в прохладном сухом месте, и выполняйте цикл его полной разрядки и зарядки раз в три месяца.

Инструкции по технике безопасности

- Изделие не предназначено для использования детьми младше 13 лет.
- Не рекомендуется использовать изделие при вождении автомобиля в ночное время. При необходимости использования очков остановите автомобиль.
- При наличии каких-либо заболеваний глаз, например, катаракты, глаукомы, макулярного поражения, проблем с сетчаткой глаза или серьезных глазных хирургических вмешательствах в прошлом и т. п., перед использованием изделия проконсультируйтесь с офтальмологом.

Технические характеристики

Модель: PGY8K01

Цвет: Черный/Белый/Розовый

Емкость аккумулятора: 290 мА·ч

Материал: ПК+АБС

Тип аккумулятора: Литий полимерный

Напряжение питания: 5,0 В пост. тока

Входной ток: 300 мА (максимум)

Соединение: Bluetooth 4.0

Гарантия на изделие

Гарантия на очки PEGASI составляет 12 месяцев со дня продажи устройства:

1. При возникновении в течение 30 дней с даты покупки изделия каких-либо проблем из перечисленных в таблице неисправностей и повреждений производится бесплатная замена или ремонт изделия.
2. При возникновении в течение 12 месяцев с даты покупки изделия каких-либо проблем корпуса из перечисленных в таблице неисправностей и повреждений, после проверки и подтверждения неисправности сервисным центром послепродажного обслуживания, производится бесплатный ремонт или бесплатная замена на аналогичное устройство.

Таблица неисправностей

Деталь	Неисправности
Корпус	<ul style="list-style-type: none">• Неисправность кнопки включения• При включении осветительного модуля отсутствует световое излучение• Не удается синхронизироваться с выбранным устройством• Повреждение корпуса, вызванное дефектом материала (заводской брак)
Кабель USB	<ul style="list-style-type: none">• Не удалось зарядить очки