





ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ИЛИ
ПОЖЕЛАНИЯ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ
В НАШ КЛИЕНТ-СЕРВИС

 PARU.PRO

 MEGAMARKET4ORD@YANDEX.RU

 +7 938 313 15 69

paru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ

1



Перед применением необходимо почистить зубы

2



Выньте пластиковую прокладку между батареями

3



Прикрепите капку к светодиодной лампе

4



Нанесите по 0,5 мл геля на верхнюю и нижнюю часть капы

5



Наденьте капку и включите лампу

6



Дождитесь автоматического выключения после смойте остатки геля с зубов

7



Промойте капку теплой водой

8



Воздержитесь от приема красящихся продуктов в течение 30 минут