

2в1

ВАКУУМНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ПОР И АППАРАТ ОТ ТОНЗИЛЛИТА

Инструкция по применению



USB КАБЕЛЬ




6 НАСАДОК



3 РЕЖИМА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

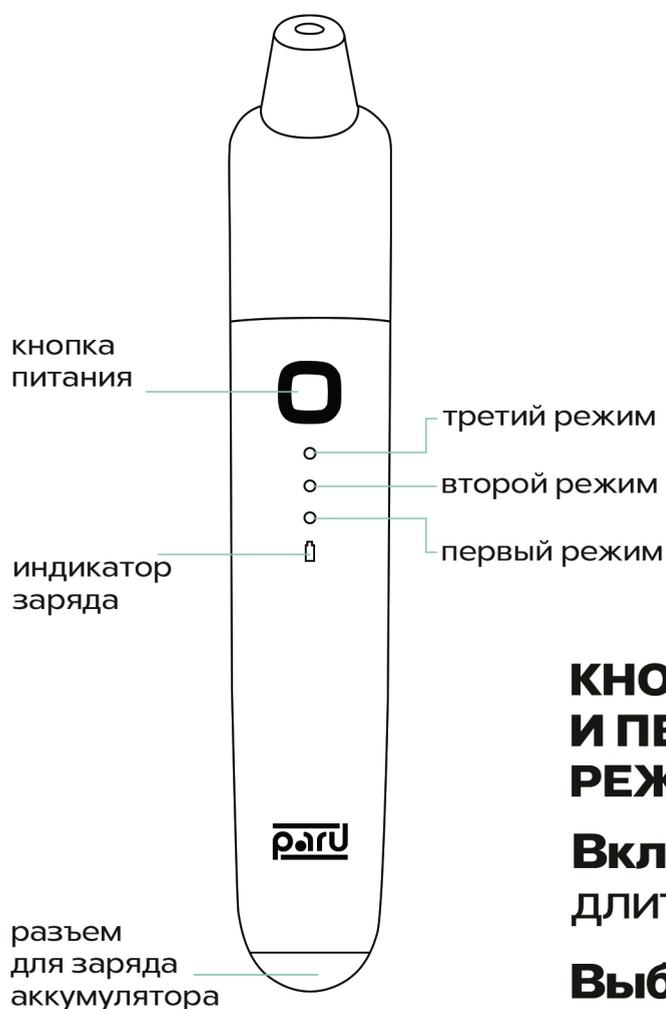

КНОПКА ПИТАНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ

Включить/выключить – длительное нажатие

Выбрать режим – одно короткое нажатие

Первый режим - низкая скорость, подходит для сухой и чувствительной кожи, а также обеспечивает мягкое удаление деликатных областей миндалин

Второй режим - средняя скорость, подходит для нормального типа кожи, а также обеспечивает сбалансированную интенсивность всасывания камней из миндалин


Третий режим - высокая скорость, подходит для жирной кожи и обеспечивает мощное всасывание глубоко расположенных камней

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Красный мигает – аккумулятор разряжен, а также во время зарядки

Зеленый – аккумулятор заряжен

КОМПЛЕКТАЦИЯ

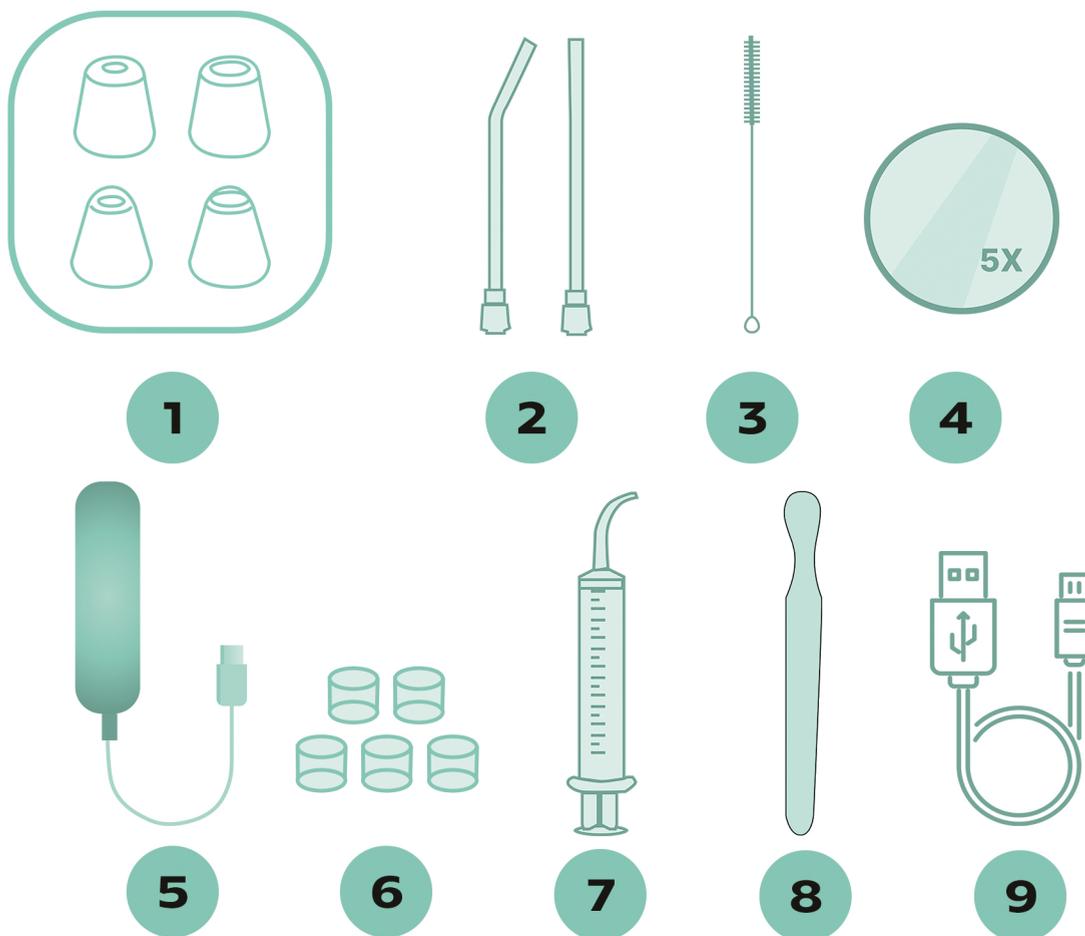

- 1 – Набор из 4 насадок для вакуумной очистки пор
- 2 – Набор насадок для удаления камней из миндалин
- 3 – Щетка для очистки насадок тор для полости рта
- 4 – Увеличительное зеркало 5х
- 5 – Светодиодный фонарик USB
- 6 – Ватная губка для фильтра, 5 шт.
- 7 – Ирригатор для полости рта
- 8 – Лопатка для языка
- 9 – USB-кабель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	4 Вт
Входное напряжение	5 В
Напряжение аккумулятора	3,7 В
Емкость аккумулятора	600 мАч

НАСАДКИ ДЛЯ ВАКУУМНОЙ ОЧИСТКИ

ШЕСТЬ СМЕННЫХ НАСАДОК



Вакуумная насадка с микрокристаллическим отверстием

Насадка с искусственными микрокристаллами подходит для удаления ороговевших клеток лица



Вакуумная насадка с большим круглым отверстием

Обладает сильной всасывающей способностью, в основном используется для чувствительной и тонкой кожи, и решения таких проблем как: удаление угрей, жира, пыли и остатков косметики



Вакуумная насадка с овальным отверстием

Обладает слабой силой всасывания, подходит для чувствительной кожи, отсасывания пыли, жира, остатков косметики и т.п.



Маленькая насадка с круглым отверстием

Подходит для ежедневного ухода за кожей, например, за морщинистыми уголками глаз, рта и т.д.



Прямая насадка

Подходит для всасывания камней и пробок из миндалин



Изогнутая насадка

Подходит для всасывания глубоко расположенных камней

ИНСТРУКЦИЯ

Микродермабразия лица (удаление ороговевших клеток)

1. Используйте микрокристаллическую насадку.
2. Начните с нижней челюсти и двигайте аппарат снизу вверх
3. Поместите прибор на щеки и ведите аппарат изнутри наружу
4. Поместите аппарат на область лба и двигайте его от центра в стороны
5. Поместите косметический прибор в Т-образную зону и ведите аппарат снизу вверх

Очищение угрей, жира, остатков макияжа

1. Замените косметическую насадку с большим круглым отверстием или маленьким круглым отверстием
2. Совместите отверстие насадки с участком кожи, за которым нужно ухаживать, и двигайте его в одном направлении. Не следует использовать его слишком долго

Уход за морщинами

1. Замените косметическую головку на головку с овальным отверстием
2. При использовании аппарата для ухода за уголками глаз, носом, ртом и другими зонами установите режим в зависимости от степени выраженности морщин. Двигайте аппарат в одном направлении

Микрокристаллическая насадка

- Не рекомендуется использовать вокруг глаз, на грубых и морщинистых участках лица, а также на тонких участках, таких как спина и руки

Вакуумная насадка с большим круглым отверстием

- Не рекомендуется использовать для области вокруг глаз. Можно использовать для огрубевшей и морщинистой коже лица и тела, локтях и т.д.

Маленькая насадка с круглым отверстием

Для тонкой, чувствительной и нормальной кожи


Насадка с овальным отверстием

Нанесение на щеки, глаза, нос, губы и т.д.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед использованием очистите кожу лица и тщательно высушите.
- Функция микродермабразии рекомендуется для сухой кожи один раз в неделю, для жирной и комбинированной кожи можно использовать два раза в неделю, не более 5 минут каждый раз. После процедуры на коже может быть небольшое покраснение, это нормально.
- Не прижимайте сменную головку к коже, инструмент обладает сильным отшелушивающим эффектом.
- После процедуры нанесите увлажняющий и солнцезащитный крем.
- Не используйте пилинги или другие отшелушивающие средства до или после процедуры.
- Не используйте прибор на травмированной или рубцовой коже.
- Не используйте прибор чаще 3 раз в неделю, иначе это может привести к чувствительности миндалин или травмировать их.
- Воздействие на миндалины не должно превышать 5 секунд (подождите некоторое время и повторите попытку)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАСАДОК ОТ ТОНЗИЛЛИТА

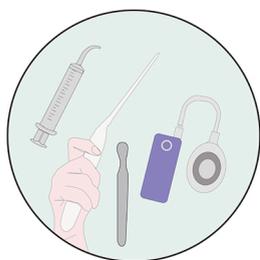


- Подготовьте все необходимое для проведения процедуры (аппарат, увеличительное зеркало, фонарик, ирригатор для полости рта, лопатка для языка).
1. увеличительное зеркало, фонарик, ирригатор для полости рта, лопатка для языка).

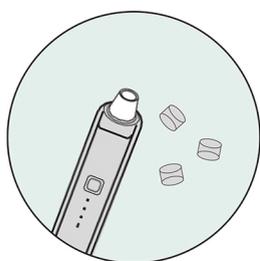

2. Установите ватную губку для фильтра в паз для насадки и установите насадку.




3. Промойте миндалины с помощью ирригатора.

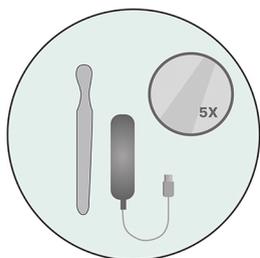

4. Воспользуйтесь увеличительным зеркалом, лопаткой для языка и фонариком для более удобного удаления камней.



5. Удалите камни из миндалин с помощью вакуумного аппарата.

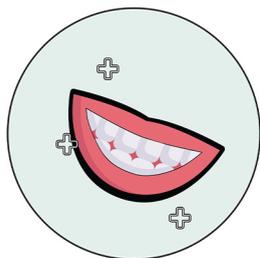

6. Наслаждайтесь здоровой полостью рта и свежим дыханием.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- После использования снимите насадку
1. и очистите с помощью специальной щетки и дезинфицирующего средства.
 2. После очистки насадки, вытрите ее насухо.
 3. Корпус прибора не является водо- непроницаемым, не погружайте его в воду.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование продукта	Косметический аппарат 2 в 1 PARU
Период гарантии	1 год
Сертификация продукции	Декларация соответствия ТР ТС
Результат проверки	Квалифицированный



ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ИЛИ
ПОЖЕЛАНИЯ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ
В НАШ КЛИЕНТ-СЕРВИС

🌐 [PARU.PRO](https://paru.pro)

✉ MEGAMARKET4ORD@YANDEX.RU

☎ +7 938 313 15 69