

# GÉZATONE

# YANVO'O



パーカッションマッサージャ

ИНСТРУКЦИЯ/ҚОЛДАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

---

EYE MASSAGER | ISEE411



## МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ ISEE 411

Разработанный на основе ручного и механического массажа, интеллектуальный массажер для глаз iSee 411 Gezatone (далее «Прибор») в основном используется для массажа висков и точечного массажа в глазной области с помощью пневмомассажа, вибрационного массажа и прогрева для облегчения усталости глаз и расслабления пользователя. Встроенная в прибор расслабляющая музыка обеспечивает качественное расслабление. Этот массажер незаменим для жителей большого города. Выглядит как очки и оснащен перезаряжаемой батареей. Легко складывается, стильно выглядит, прост в эксплуатации и может использоваться в любое время и в любом месте.

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



Тем, кто много времени проводит за компьютером, экраном планшета или смартфона. Тем, кто водит автомобиль. Постоянное напряжение зрения повышает нагрузку на сосуды, провоцирует застой лимфы, что приводит к покраснению и отекам. Всем, кто хочет сохранить остроту зрения и красоту глаз надолго. Массаж глаз улучшает состояние мышц и сосудов, противодействует возрастным изменениям зрения, оказывает косметическое действие, повышает тонус кожи, корректирует отеки и темные круги.

### ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

- Пневмомассаж: массирует виски, а также другие важные акупунктурные точки в области глаз путем сжатия и расслабления сильного давления воздуха.
- Вибрационный массаж: имитирует похлопывания, шиацу и другие традиционные массажные манипуляции для массажа различных важных частей глаз.
- Прогрев: быстрое повышение температуры и поддержание ее на одном уровне помогает ускорить циркуляцию крови в области глаз.
- Удобный в использовании, легко переносить;
- Управление двумя кнопками; Дисплей с индикаторами режимов работы.

## ВНЕШНИЙ ВИД И СОСТАВ ПРИБОРА

## 装置の外観と構成

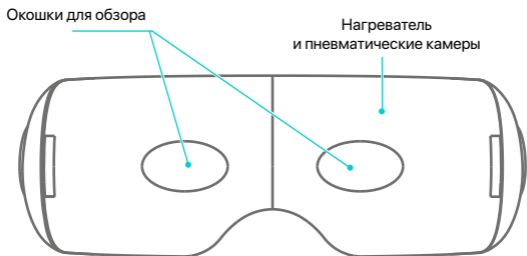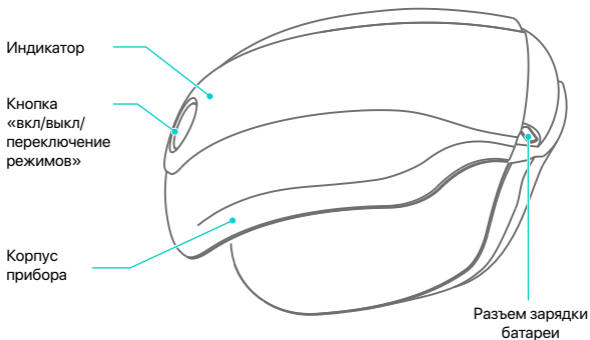

## РАБОТА ПРИБОРА

## デバイスの操作

Перед началом работы зарядите аккумулятор прибора (см. пункт «Использование аккумулятора»). Отрегулируйте длину ремешка так, чтобы массажер не давил на кожу, но плотно и комфортно прилегал к лицу.

1.Нажмите и удерживайте кнопку «вкл/выкл/переключение режимов» около 1,5 секунд для включения массажера. Коротким нажатием на кнопку переключайте режимы работы. Всего 4 режима работы работы прибора (переключаются по кругу коротким нажатием на кнопку):

-Активный режим: Прессотерапия 1 уровня+Нагрев+мелодия «Лесное исцеление»

-Успокаивающий режим: Прессотерапия 2 уровня+Нагрев+мелодия «Горный ручей»

-Режим подготовки ко сну: Прессотерапия 3 уровня+Нагрев

-Режим «Упражнения для глаз»: Прессотерапия 4 уровня+Нагрев+мелодия «Водное царство»

2. Режим подготовки ко сну не имеет музыкального сопровождения.

Чтобы выключить музыку в других режимах, дважды коротко нажмите на кнопку.

Чтобы снова включить музыку, дважды нажмите кнопку ещё раз.

3. При первом подключении массажера к Bluetooth для прослушивания музыки с телефона понадобится подключиться вручную (в дальнейшем это будет происходить автоматически). Включите Bluetooth на телефоне, выполните поиск устройств и выберите iSee411. Прибор, подключенный к телефону ранее, будет подключаться при включении. При подключении к Bluetooth вы услышите голосовое оповещение на английском языке: «Bluetooth connected». При низком уровне заряда батареи прозвучит голосовое оповещение: «Low battery, please charge», при этом все 4 индикатора на панели прибора будут моргать красным.

## ИНДИКАТОРЫ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРА

## 指標



Иконка музыки



Иконка зарядки



Иконка прессотерапии



Иконка нагрева

4. Прибор выключится автоматически через 15 минут. Если во время проведения процедуры подключить прибор к зарядке, он также выключится и не включится до отсоединения зарядного провода. Для выключения прибора во время проведения процедуры нажмите и удерживайте кнопку около 1,5 сек.

## ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

## 清掃とメンテナンス

1. Для очистки протрите прибор слегка влажной мягкой тканью или полотенцем.
2. Храните продукт в сухом и проветриваемом помещении.
3. Не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, высокой температуры или повышенной влажности.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА

1. Если уровень мощности проводимой процедуры понизился или прибор отключился во время проведения процедуры, значит нужно подзарядить аккумулятор.  
Подключите провод из комплекта прибора к разъему зарядки на корпусе и к разъёму USB компьютера или зарядного устройства с выходом USB 5B 1A (в комплект не входит).  
Во время зарядки индикатор горит красным, после зарядки зеленым. Полная зарядка аккумулятора длится около 4 часов. После окончания зарядки индикатор на дисплее и индикатор рядом с разъёмом горят синим цветом непрерывно.
2. Полностью заряженный аккумулятор можно использовать в течение 4-5 дней.
3. Обычно срок службы заряжаемого аккумулятора составляет около 3 лет.
4. Срок службы будет сокращаться, если аккумулятор не будет использоваться в течение длительного времени. Рекомендуется заряжать аккумулятор не менее раза в месяц.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

## 予防  ступать к работе

1. Не использовать прибором.
2. Очистите поверхность массажера перед использованием.
3. Запрещено использовать детям и лицам с ограниченными умственными способностями.
4. Запрещено использовать при чувствительной коже или нечувствительности к теплу.
5. Запрещено использовать беременным женщинам, людям, страдающим сердечными заболеваниями, злокачественной опухолью, краниальными сосудистыми заболеваниями и другими острыми заболеваниями, а также тем, кто проходит медикаментозное лечение.

6. Прекратите использование продукта, если вы чувствуете дискомфорт во время использования. Проконсультируйтесь с врачом.
7. Не используйте массажер или пользуйтесь им под руководством врача, если у Вас проблемы с глазами. Запрещено использовать после проведенных операций на глаза, а также страдающим глаукомой, катарактой, отслойкой сетчатки и другими глазными заболеваниями.
8. Перед использованием прибора снимите контактные линзы.
9. Не используйте прибор в жарком и влажном помещении, или помещении с повышенным электромагнитным излучением.
10. Не разбирайте прибор, не допускайте ударов и попадания воды на корпус.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## 技術仕様

Название: Массажер для глаз

Модель: iSee411 Gezatonе

Зарядное устройство: DC 5V, 1A, разъем USB, тип A (приобретается отдельно)

Батарея: 3.7 V, 1200mA\*ч

Размер упаковки: 200 x165 x 100 мм

Создаваемое давление в режиме «Пневмомассаж»: 0-32 кПа

Температура в режиме «Прогрев»: 38-43°C

## ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРИТЕЛЬНОГО СИНДРОМА

При работе за компьютером люди могут чувствовать себя некомфортно.

Офтальмологи и окулисты называют это компьютерным зрительным синдромом.

1. Усталость глаз будет усугубляться, если долго не моргать при просмотре флуоресцентного экрана.

Это часто возникает при чтении большого количества файлов, поскольку пользователь компьютера не моргает или моргает как можно меньше, чтобы не пропустить нужную информацию. Моргание важно для защиты глаз. Оно помогает снять напряжение глазного яблока и глазных мышц, предотвращает боль, резь в глазах, а также другие симптомы.

2. Аномальная реакция «эффект Мак-Коллоу» будет возникать после просмотра зеленых слов на черном флуоресцентном экране Во время работы перед флуоресцентным экраном. Хотя это безвредно для организма, этот симптом может продолжаться несколько дней. Это может сделать белые слова слегка розовыми: кусок бумаги, наклеенный на белую стену, будет выглядеть, как бумага с розовым краем.

3. Для людей в очках оптимальное расположение всех предметов должно быть на расстоянии 30–45 см. Если высота экрана не подходит или расстояние слишком маленькое, пользователю компьютера будет неудобно он либо будет низко нагибаться, либо голова будет поднята в неудобном положении, что может вызвать головокружение, боль в шеи и груди или общее недомогание. По словам эксперта, работа с компьютером это работа, чрезмерно напрягающая глаза, и она может уменьшить выделение смазки и фермента в глазах. То есть будет ощущаться сухость и усталость глаз, помутнение зрения, боль в голове и шеи, а также другие симптомы, если моргать недостаточно часто.

## КАК ИЗБЕЖАТЬ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРИТЕЛЬНОГО СИНДРОМА

Работа на компьютере является неотъемлемой частью современной жизни. Многие люди должны смотреть на экран компьютера в течение всего рабочего дня. Это может привести к легкой усталости и вызвать некоторые заболевания, такие как глаукома. Необходимо следить за здоровьем глаз и зрением.

### Ниже несколько советов:

1. Избегайте длительной работы на компьютере и делайте перерывы. Делайте 5-10 минут отдыха после работы на компьютере в течение часа. Рекомендуется сделать зарядку для глаз.
2. Следите за позой во время работы. Держите наиболее подходящую позу, чтобы глаза смотрели на экран горизонтально или слегка вниз. Оптимальное положение центр экрана это часть на 20° ниже горизонтальной линии обзора. Это положение может расслаблять мышцы шеи и минимизировать область, в которой глаза подвергаются воздействию воздуха.
3. Держитесь на правильном расстоянии от компьютера. Глаза должны быть минимум в 60 см от экрана компьютера.
4. Создайте вокруг подходящие условия. Окружающий свет должен быть мягким, экран компьютера должен иметь соответствующую легкость и отличную четкость. Не работайте в темной среде, потому что черно-белый контраст может повредить глаза. Высота стола и стула должна соответствовать настройкам компьютера.
5. Обратитесь к офтальмологу, если массаж не помогает избавиться от сухости и красноты глаз, жжения или других симптомов, тяжелых век, размытости и головной боли.

KZ

## ISEE 411 КӨЗ МАССАЖЕРІ

Қолмен және механикалық массаж негізінде әзірленген Gezatone iSee 411 интеллектуалды көз массажы (бұдан әрі - «Құрылғы») негізінен пневматикалық массаж, діріл массажы және көздің шаршауын басатын және пайдаланушыны босаңсыту үшін көз аймағындағы ғибадатхана массажы мен нүктелік массаж үшін қолданылады.

Құрылғының кіріктірілген босаңсытатын музыкасы сапалы релаксацияны қамтамасыз етеді. Бұл массажер үлкен қала тұрғындары үшін таптырмас құрал. Ол көзілдірікке ұқсайды және қайта зарядталатын батареямен жабдықталған.

Бүктеу оңай, сыртқы түрі стильді, басқару оңай және кез келген уақытта, кез келген жерде пайдалануға болады.

### ПАЙДАЛАНУҒА КӨРСЕТУ



Компьютерде, планшетте немесе смартфон экранында көп уақыт өткізетіндер үшін. Көлік жүргізетіндер үшін. Тұрақты көздің штаммы қан тамырларына жүктемені арттырады, лимфа тоқырауын тудырады, бұл қызаруға және ісінуге әкеледі. Көру өткірлігі мен көзінің сұлулығын ұзақ уақыт сақтағысы келетіндердің барлығына. Көз массажы бұлшықеттер мен қан тамырларының жағдайын жақсартады, көрудің жасқа байланысты өзгерістеріне қарсы тұрады, косметикалық әсер етеді, тері өңін жақсартады, ісіну мен қара шеңберді түзетеді.

### ФУНКЦИЯЛАР МЕН МҮМКІНДІКТЕР

- Пневматикалық массаж: күшті ауа қысымын сығымдау және босату арқылы ғибадатханаларды, сондай-ақ көз аймағындағы басқа маңызды акупунктура нүктелерін уқалайды.
- Діріл массажы: көздің әртүрлі маңызды бөліктерін уқалау үшін сипау, шиацу және басқа да дәстүрлі массаж манипуляцияларын имитациялайды.
- Жылыту: Температураны тез көтеру және оны тұрақты деңгейде ұстау көз аймағындағы қан айналымын жылдамдатуға көмектеседі.
- Пайдалануға ыңғайлы, тасымалдауға ыңғайлы;
- Екі түймелі басқару; Жұмыс режимінің индикаторлары бар дисплей.

## ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ПАЙДАСЫ ЖӘНЕ

## 装置の外観と構成

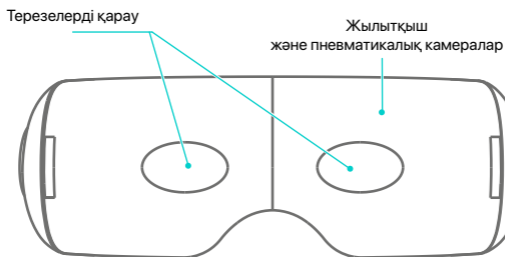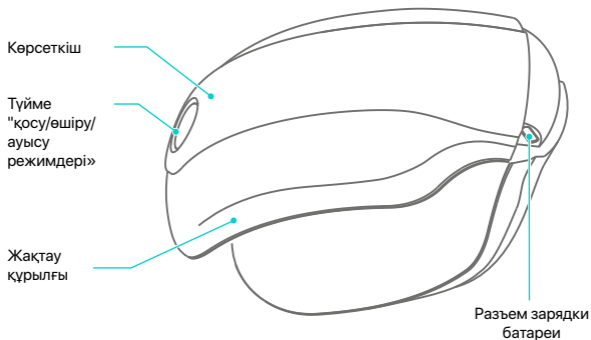

## ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

## デバイスの操作

Жұмысты бастамас бұрын құрылғының батареясын зарядтаңыз («Батареяны пайдалану» тарауын қараңыз). Баудың ұзындығын массажер теріге баспайтындай етіп реттеңіз, бірақ бетке тығыз және ыңғайлы орналасады.

1. Массажерді қосу үшін қосу/өшіру/режимді ауыстыру түймесін шамамен 1,5 секунд басып тұрыңыз. Түймені қысқа басу арқылы жұмыс режимдерін ауыстырыңыз. Құрылғының тек 4 жұмыс режимі бар (батырманы қысқа басу арқылы шеңберге ауыстырылады):

- Белсенді режим: Прессотерапия 1-деңгей + Жылыту + «Орманды емдеу» әуені  
- Тыныштандыру режимі: Прессотерапияның 2 деңгейі + Жылыту + «Тау ағыны» әуені

- Ұйқы режиміне дайындық: Прессотерапия 3 деңгей + Жылыту

- «Көзге арналған жаттығулар» режимі: прессотерапия 4 деңгей + жылыту + «Су патшалығы» әуені

2. Ұйқыға дайындық режимінде музыкалық сүйемелдеу жоқ.

Басқа режимдерде музыканы өшіру үшін түймені екі рет қысқаша басыңыз.

Музыканы қайта қосу үшін түймені қайтадан екі рет басыңыз.

3. Музыка тыңдау үшін массажерді Bluetooth жүйесіне алғаш қосқанда Сізге телефоннан қолмен қосылу қажет (болашақта бұл автоматты түрде орындалады). Телефоныңызда Bluetooth қосыңыз, құрылғыларды іздеңіз және iSee411 таңдаңыз. Телефонға бұрын қосылған құрылғы қосылған кезде қосылады. Bluetooth қосылған кезде, сіз ағылшын тіліндегі дауыстық хабарландыруды естисіз: "Bluetooth қосылды". Батарея деңгейі төмен болғанда, дауыстық хабарлама шығады: «Батарея заряды аз, зарядтаңыз», Бұл ретте құралдар тақтасындағы барлық 4 индикатор қызыл болып жыпылықтайды.

## КӨРСЕТКІШТЕР

## 指標



Музыка белгішесі



Зарядтау белгішесі



Прессотерапия белгішесі



Жылыту белгішесі

4. Құрылғы 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді. Процедура барысында құрылғыны зарядтағышқа қоссаңыз, ол да өшеді және зарядтау кабелін ажыратпайынша қосылмайды. Процедура барысында құрылғыны өшіру үшін түймені шамамен 1,5 секунд басып тұрыңыз.

## ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

## 清掃とメンテナンス

1. Тазалау үшін құралды сәл дымқыл жұмсақ шүберекпен немесе сүлгімен сүртіңіз.
2. Өнімді құрғақ және желдетілетін жерде сақтаңыз.
3. Оны тікелей күн сәулесінің, жоғары температураның немесе жоғары ылғалдылықтың астында қалдырмаңыз.

## БАТАРЕЯНЫ ПАЙДАЛАНУ

1. Орындалып жатқан процедураның қуат деңгейі төмендесе немесе процедура барысында құрылғы өшіп қалса, батареяны қайта зарядтау қажет. Құрылғы жинағынан кабельді корпустағы зарядтау қосқышына және компьютердің USB қосқышына немесе USB 5V 1A шығысы бар зарядтағышқа қосыңыз. (қосылмаған). Батарея зарядталып жатқанда, құрылғы экранындағы зарядтау индикаторы көк түспен жыпылықтайды, ал зарядтау портының жанындағы индикатор да көк түспен жыпылықтайды. Батареяны толық зарядтау шамамен 4 сағатты алады. Зарядтау аяқталғаннан кейін дисплейдегі индикатор мен қосқыштың жанындағы индикатор үздіксіз көк болып жанады.
2. Толық зарядталған батареяны 4-5 күн пайдалануға болады.
3. Қайта зарядталатын батареяның әдеттегі қызмет ету мерзімі шамамен 3 жыл.
4. Батарея пайдаланылмаса, қызмет ету мерзімі қысқарады. ұзақ уақытқа. Батареяны айына кемінде бір рет зарядтау ұсынылады.

## САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

## 予防

1. Жұмысты бастамас бұрын нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. құрылғымен.
2. Массажер бетін қолданар алдында тазалаңыз.
3. Балалар мен ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға қолдануға болмайды.
4. Сезімтал немесе сезімтал теріге қолданбаңыз. жылулыққа.
5. Жүкті әйелдерге, жүрек ауруымен, қатерлі ісікпен, бас сүйек-ми тамырлары ауруларымен және басқа да жіті аурулармен ауыратын адамдарға, сондай-ақ ауыратын адамдарға тыйым салынады. есірткіден емделіп жатқандар.

6. Қолдану кезінде ыңғайсыздық сезінсеңіз, өнімді пайдалануды тоқтатыңыз. Дәрігеріңізбен кеңесіңіз.
7. Массажерді қолданбаңыз немесе көзіңізде ақау болса, дәрігердің бақылауымен қолданбаңыз. Оны көзге операциядан кейін, сондай-ақ глаукома, катаракта, тор қабығының бұзылуы және басқа да көз ауруларымен ауыратындарға қолдануға тыйым салынады.
8. Құрылғыны қолданар алдында контактілі линзаларды алып тастаңыз.
9. Құрылғыны ыстық және ылғалды бөлмеде немесе электромагниттік сәулеленуі жоғары бөлмеде пайдаланбаңыз.
10. Құрылғыны бөлшектемеңіз, оны соққыға ұшыратпаңыз немесе судың денеге енуіне жол бермеңіз.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

## 技術仕様

Атауы: Көз массажы

Үлгі: iSee411 Gezatone

Заряптағыш: DC 5V, 1A, USB қосқышы, А түрі (бөлек сатылады)

Батарея: 3,7 В, 1200 мАч

Пакет өлшемі: 200 x 165 x 100 мм

«Пневматикалық массаж» режимінде пайда болатын қысым: 0-32 кПа

«Жылыту» режиміндегі температура: 38-43°C

## КОМПЬЮТЕРЛІК КӨРУ СИНДРОМЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ

Адамдар компьютерде жұмыс істегенде өзін жайсыз сезінуі мүмкін. Офтальмологтар мен оптометрлер бұл компьютерлік көру синдромы деп атайды.

1. Флуоресцентті экранға қарап ұзақ уақыт жыпылықпасаңыз, көздің шаршауы күшейеді.

Бұл көбінесе файлдардың үлкен санын оқығанда орын алады, өйткені компьютер пайдаланушысы қажетті ақпаратты жіберіп алмау үшін жыпылықтамайды немесе мүмкіндігінше аз жыпылықтайды. Көзді қорғау үшін жыпылықтау маңызды. Бұл көз алмасы мен көз бұлшықеттеріндегі кернеуді жеңілдетуге көмектеседі, ауырсынуды, көздің шағуын және басқа белгілерді болдырмайды.

2. Флуоресцентті экран алдында жұмыс істеу кезінде қара флуоресцентті экранда жасыл сөздерді көргеннен кейін «Макколлоу эффектісі» қалыптан тыс реакция пайда болады. Денеге зиянсыз болса да, бұл симптом бірнеше күнге созылуы мүмкін. Бұл ақ сөздерді сәл қызғылт етіп көрсетуі мүмкін: ақ қабырғаға жапсырылған қағаз парағы қызғылт жиегі бар қағазға ұқсайды.

3. Көзілдірігі бар адамдар үшін барлық заттардың оңтайлы орналасуы 30–45 см қашықтықта болуы керек, егер экранның биіктігі сәйкес келмесе немесе арақашықтық тым аз болса, компьютер пайдаланушысы төмен еңкейгенде немесе басын ыңғайсыз күйде ұстауда ыңғайсыздық сезінеді, бұл бас айналуы, мойын мен кеудедегі ауырсынуды немесе жалпы нашарлықты тудырады. Маманның айтуынша, компьютерде жұмыс істеу көзге шамадан тыс жүктеме түсіретін жұмыс болып табылады және ол көзге май мен ферменттің бөлінуін азайтады. Бұл көзді жиі жыпылықтатпасаңыз, құрғақ және шаршаған көздер, бұлыңғыр көру, бас және мойын аймағындағы ауырсыну және басқа белгілерді сезінетінін білдіреді.

## КОМПЬЮТЕРЛІК КӨРУ СИНДРОМЫНАН ҚАЛАЙ ҚОЛДАНУҒА БОЛАДЫ

Компьютерде жұмыс істеу қазіргі өмірдің ажырамас бөлігі болып табылады. Көптеген адамдар жұмыс күні бойы компьютер экранына қарауға мәжбүр. Бұл жеңіл шаршауға әкелуі мүмкін және глаукома сияқты кейбір ауруларды тудыруы мүмкін. Көздің денсаулығы мен көру қабілетін бақылау қажет.

Міне, кейбір кеңестер:

1. Компьютерде ұзақ уақыт жұмыс істеуден аулақ болыңыз және үзіліс жасаңыз. Компьютерде бір сағат жұмыс істегеннен кейін 5–10 минут демалыңыз. Көзге жаттығулар жасау ұсынылады.
2. Жұмыс кезінде өз қалпыңызды бақылаңыз. Ең қолайлы позаны сақтаңыз, көзіңіз экранға көлденең немесе сәл төмен қарайтындай етіп. Экранның ортасының оңтайлы орны - көрудің көлденең сызығынан 20° төмен орналасқан бөлігі. Бұл позиция мойын бұлшықеттерін босаңсытып, көздің ауаға ұшырайтын аймағын азайтады.
3. Компьютерден дұрыс қашықтықты сақтаңыз. Көздер компьютер экранынан кемінде 60 см қашықтықта болуы керек.
4. Айналаңызда қолайлы жағдай жасаңыз. Қоршаған ортаның жарығы жұмсақ болуы керек, компьютер экраны тиісті жарықтылық пен тамаша айқындылыққа ие болуы керек. Қараңғы ортада жұмыс істемеңіз, себебі ақ-қара контраст көзіңізге зақым келтіруі мүмкін. Үстел мен орындықтың биіктігі компьютер параметрлеріне сәйкес келуі керек.
5. Массаж құрғақ көзді, қызаруды, жануды немесе басқа белгілерді, ауыр қабақтарды, бұлыңғыр көруді және бас ауруын жеңілдетуге көмектеспесе, офтальмологпен кеңесіңіз.



# GÉZATONE

# YANO'O

Массажер для области вокруг глаз, Серия(тип) iSee, модель iSee411, бытовой электрический, т.м. Gezatone

Изготовитель: "Gezanne I.T.C."/"Жезанн И.Т.С.", адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France, /Сент Авертен 39 рю де Гранж Галан, Франция. Филиал завода-изготовителя: Guangzhou Whale Import & Export Trading Co., Ltd, Room 1307, World Trade Center South Tower, No.371-375 Huanshi Dong Road, Yuexiu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China, Китай. Импортёр/уполномоч. изготовителем орг.: ООО «МИТРИДАТ», РФ, Москва, Алтуфьевское ш., д. 41, стр. 1, эт. 2, пом. I, ком 8, тел.: 8 (495) 225 25 83. Срок службы: 3 года.

KZ. Көз айналасындағы аймаққа арналған массажер, iSee сериясы (түрі), iSee411 үлгісі, тұрмыстық электр, т.м. Gezatone

Өндіруші: «Gezanne I.T.C.», мекенжайы: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, Франция, / Saint Avertin 39 rue de Granges Galand, France. Өндіруші филиалы: Guangzhou Whale Import & Export Trading Co., Ltd, Room 1307, World Trade Center South Tower, No.371-375 Huanshi Dong Road, Yuexiu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China, Қытай. Импорртаушы/өкілетті өндіруші ұйым: «МИТРИДАТ» ЖШҚ, Ресей Федерациясы, Мәскеу қ., Алтуфьевское тас жолы, 41, 1 корпус, fl. 2, бөлме I, 8 кабинет, тел.: 8 (495) 225 25 83.

Дата производства: 04.2025



design by  
Yano Aboba